

Funcionamiento

- El usuario es responsable de garantizar la compatibilidad entre el cable y el equipo de monitoreo.
- El conjunto cable troncal+derivaciones de ECG debe utilizarlo solo profesionales clínicos con la formación apropiada.
- No posee contraindicaciones.
- Compruebe el conjunto cable troncal+derivaciones de ECG antes de utilizarlos. No los utilice para el monitoreo si observa daños, deterioros o contaminación visible.
- Intente que el paciente permanezca quieto durante la medición.

Advertencias

- Extienda y oriente cuidadosamente el cable para reducir el riesgo de enredos o estrangulamiento del paciente.
- No utilice el conjunto cable troncal+derivaciones de ECG durante la obtención de imágenes por resonancia magnética (RMN). La corriente inducida puede provocar quemaduras.
- No utilice nunca un cable troncal que no sea a prueba de desfibrilación si utiliza un desfibrilador, a menos que el monitor del paciente incluya la función de limitación de corriente.
- Cuando conecte las derivaciones, compruebe que todos los electrodos estén conectados al paciente, para evitar que entren en contacto con partes conductoras o que hagan masa.

Precaución

- La colocación incorrecta de los electrodos puede producir mediciones inexactas.
- No sumerja el conjunto en líquidos.
- Tenga especial cuidado al limpiar o desinfectar el conjunto para evitar humedecer los contactos.
- Se recomienda desinfectar el conjunto únicamente si es necesario, según la política del hospital, para evitar daños al mismo.
- Utilice siempre los agentes de limpieza o desinfectantes recomendados.

Procedimiento

- 1- Verifique la compatibilidad del cable con el equipo. Tanto el conector del equipo como el del cable deben compatibilizar en geometría y cantidad de terminales.
- 2-Conecte el cable al equipo en el receptáculo correspondiente. Verifique que haga tope en el fondo del receptáculo.
- 3-Coloque los electrodos sobre el paciente como indica la figura. Verifique el correcto ajuste de los electrodos.

Limpieza

Desconecte el cable del equipo y del paciente

Limpie el cable troncal, derivaciones y conector a equipo con un paño embebido en agua y jabón neutro.

Termine la operación repasando todo el conjunto con un paño seco.

Desinfección y esterilización

Limpie el cable según las instrucciones anteriores.

Desinfecte el cable con algodón o un paño suave humedecido con uno de los desinfectantes recomendados (etanol (70%), isopropanol (70%) y desinfectantes líquidos del tipo glutaraldehído (2%))

Después de desinfectarlo asegúrese de retirar cualquier resto de desinfectante del cable con un paño suave humedecido con agua.

Termine la operación repasando todo el conjunto con un paño seco.

No se recomienda esterilizar con óxido de etileno ni en autoclave

Garantía

El cable está cubierto por una garantía del fabricante contra defectos de material y/o de fabricación por un plazo de 6 meses, a partir de la compra del mismo. Durante dicho periodo la reparación o sustitución del producto defectuoso correrá por cuenta del fabricante.

El fabricante no cubrirá daños ocasionados por uso inadecuado, falta de cuidado con la unidad, o cualquier otro problema que sea considerado resultante del desgaste excesivo.

La garantía se anulará automáticamente ante cualquier alteración o modificación del producto

Fabricado por **CARDIOTECNICA SRL**
Reservistas Argentinos 443 Capital Federal
Autorizado por A.N.M.A.T PM 1230-9
D.T: BioIng Federico Ramos Mat. COPIME 11620

VENTA EXCLUSIVA A PROFECIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.