



Cardio Técnica

Fabrica Argentina de *Equipamiento Hospitalario*



Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Manual de Uso Carro de Emergencias HS-ET750

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Tabla de Contenido

Parte I Introducción	2
1 Precauciones de uso y seguridad.....	2
2 Descripción general de funciones e instrucciones.....	3
Funciones y Uso del Carro	4
Ubicación del Carro de Emergencia HS-ET750	5
Parte II Especificaciones	6
1 Medidas.....	6
2 Características.....	6
3 Lista de Partes.....	7
Parte III Mantenimiento y limpieza	8
Parte IV Importador	9

1 Introducción

Este manual es aplicable al carro de emergencias HS-ET750 e incluye diversas precauciones para un uso seguro, descripción de funciones, mantenimiento y otra información sobre el carro.

Las imágenes de este manual son solo de referencia.

1.1 Precauciones de uso y seguridad


Campo de aplicación

Los productos son aptos para hospitales, instituciones de bienestar y convalecencia y otras áreas.

Precauciones para un uso seguro

- Asegúrese de leer atentamente estas «precauciones para un uso seguro» antes de utilizar el producto, a fin de manipularlo correctamente.
 - Si la operación no se realiza de acuerdo con las precauciones de uso seguro, el producto puede dañarse.
 - El tablero de la mesa está equipado con un cobertor plástico. Durante el uso, el tablero de la mesa debe estar protegido con el cobertor plástico para evitar que derrames de fármacos corroan el tablero.
 - Durante su uso, se debe presionar el freno para fijar el carro; suelte el freno antes de mover el carro para evitar dañar la rueda universal.
 - Si el cajón no está bien cerrado y se gira la cerradura central, el cajón no se bloqueará y la cerradura central se dañará.
 - Al cerrar el cajón, asegúrese de que sus manos estén fuera del mismo para evitar lesiones por aprisionamientos.
 - El carro de emergencia cuenta con un cable de alimentación en la parte trasera. Cuando lo utilice, apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable a tiempo para evitar posibles fugas o descargas eléctricas.
 - No golpee el carro violentamente contra otros objetos para evitar daños.
 - Evite el contacto prolongado con líquidos corrosivos para no acortar la vida útil de los productos.
 - El mantenimiento debe ser realizado por personal autorizado por el fabricante.
 - El carro no presenta interferencias electromagnéticas evidentes, ni otras interferencias con otros equipos. Cualquier información importante relacionada con la seguridad debe ser respetada.
 - Después de leer el manual, guárdelo en un lugar donde pueda verlo en cualquier momento.
 - Manténgase alejado del fuego. No utilice calefactores ni aparatos de calefacción cerca del carro de emergencia, ya que podría deteriorarse, deformarse o incluso incendiar algunas de sus partes.
-

1.2 Descripción general de funciones e instrucciones

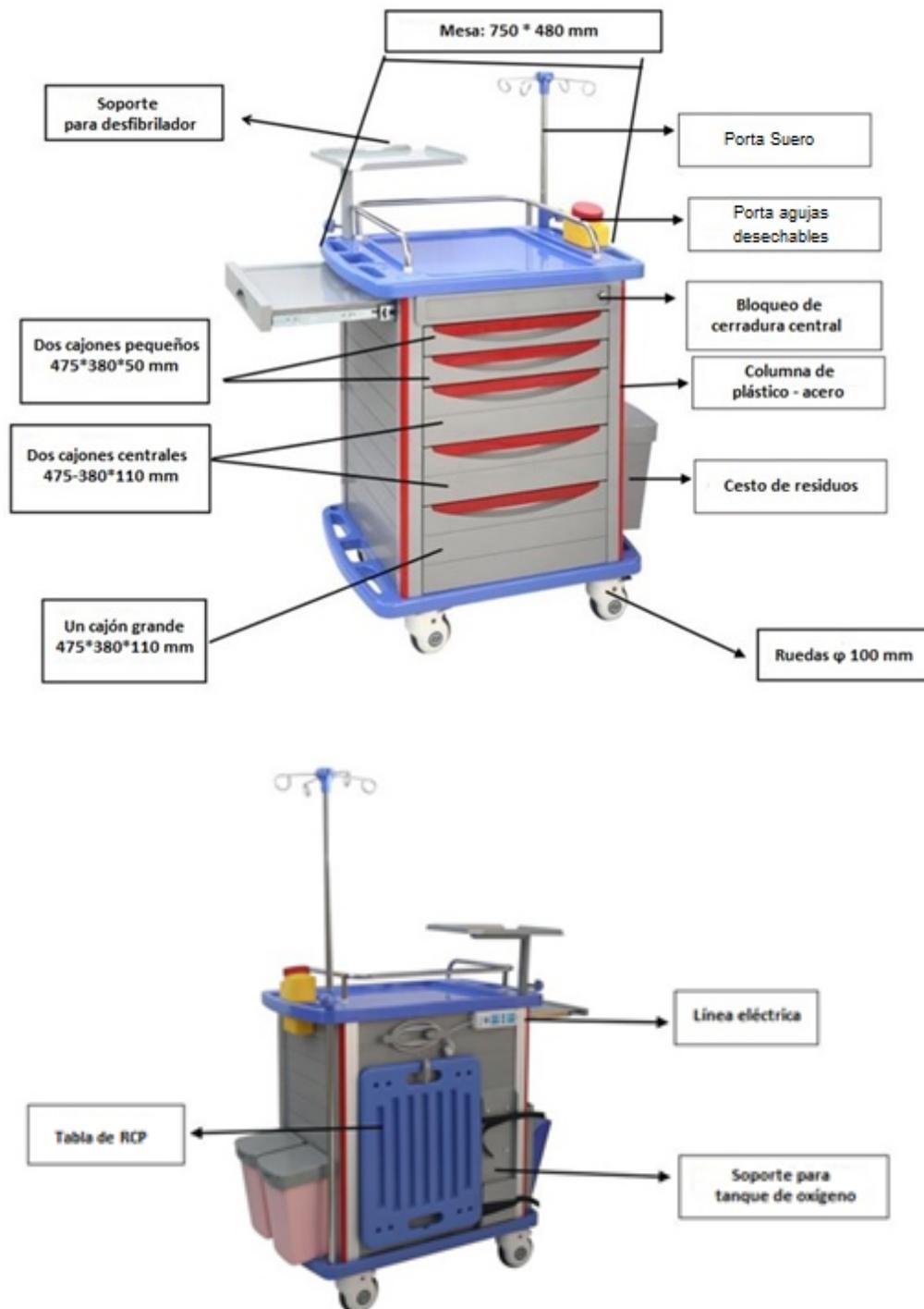

* El producto real puede diferir al de la imagen anterior.

1.2.1 Funciones y Uso del Carro

1. -Cómo utilizar la cerradura central: (1) retire la llave (un total de dos llaves, una de reserva), inserte la cerradura central, (2) Desbloquear y abrir el cajón cuando se utiliza; Después de usarlo, cierre bien el cajón y extraiga la llave de la cerradura central para guardarla.
 2. -Cómo utilizar el cajón: Se retira una película transparente en la superficie de cada cajón (para evitar que el inserto se deslice durante el transporte). El cajón incorpora un separador móvil que se puede dividir libremente según el tamaño de los artículos. Medicamentos, bolsas de infusión, consumibles desechables y otros artículos se pueden colocar del primer al cuarto cajón; botiquines de primeros auxilios u otros artículos grandes se pueden colocar en el último cajón. Cada cajón se puede extraer del marco y limpiar regularmente para garantizar su limpieza y eliminación de residuos.
 3. -Cómo usar el Portacarpetas: Si se utiliza el Portacarpetas ubicado en el lado izquierdo del carro de emergencia, se puede acceder tirando de él hacia afuera.
 4. -Cómo usar el cesto de residuos: El cesto de residuos está en la parte de abajo del carro de emergencia. Abra el cajón, retire la película y saque el cesto. Coloque la tapa del cesto de residuos en el contenedor, sáquela (la bolsa de basura se puede colocar dentro, no está incluida), cúbralo con ella y presione. Coloque el cesto de residuos en el gancho para basura en el lado derecho del carro de emergencia listo para usar.
 5. -Cómo usar el soporte del desfibrilador: Retire la bolsa de embalaje y desenrosque el tornillo elástico. Inserte el soporte del desfibrilador en su alojamiento, en la parte trasera izquierda de la mesa del carro de emergencia, fíjelo y apriete los tornillos sueltos. (3) Si desea ajustar la posición del soporte, desenrosque el tornillo suelto, ajústelo a la posición adecuada y apriételo.
 6. -Cómo utilizar el soporte de infusión: Retire la bolsa de embalaje y tire de la varilla de infusión de cuatro garras hacia abajo, 90 ° para formar un paraguas. Desenrosque el tornillo elástico situado en la parte trasera derecha de la mesa para el carro de emergencia, inserte la varilla de infusión, ajústela a la posición adecuada y, a continuación, apriete el tornillo elástico. Para ajustar la altura de la varilla de infusión, desenrosque el tornillo elástico, ajústela a la altura adecuada y, a continuación, apriete el tornillo elástico.
 7. -Cómo usar el Descartador de agujas: La caja amarilla Descartadora de aguja se coloca en la ranura central del mango del arco sobre la mesa para su uso. Al usarla, gire la tapa roja para desechar las agujas y otros desechos médicos. Después de usarla, enrosque la tapa roja.
-

8. -Cómo usar el cable de alimentación: Para usar el carro de emergencia, conecte el cable a la toma de corriente, extraiga el enchufe en la parte trasera del carro de emergencia y conéctelo a la toma para encenderlo. El panel de tres clavijas en la parte trasera del carro de emergencia cuenta con un interruptor. Presione el interruptor de encendido durante el uso. Después de usarlo, apague el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.
9. -Cómo usar la tabla de reanimación cardiopulmonar: Retire la bolsa de embalaje, desenrosque parte del tornillo de suspensión en la parte trasera del carro de emergencia hasta que quede horizontal. Luego, cuelgue la tabla de reanimación cardiopulmonar en la parte trasera del carro de emergencia. Gire el tornillo de suspensión 90° en sentido horario y fíjela para evitar que se deslice. Durante el uso, gire el tornillo de suspensión 90° en sentido antihorario y retire la tabla de reanimación cardiopulmonar para administrar la reanimación cardiopulmonar al paciente.
- 10.-Cómo utilizar el soporte de la botella de oxígeno: Cuando lo utilice, arranque el velcro, tire de la base del soporte de la botella de oxígeno 90° hacia abajo hasta el estado horizontal y coloque la botella de oxígeno en el soporte (no se suministra la botella de oxígeno). Fije el velcro para evitar que la botella de oxígeno se deslice. Cuando no esté en uso, tire de la base del soporte de la botella de oxígeno hacia arriba 90° hasta el estado vertical y fije el velcro.
- 11.-Cómo usar la rueda de freno: La rueda de freno está equipada con dos láminas de plástico grandes y pequeñas. el carro de emergencia se puede fijar pisando la lámina grande. Al mover el carro de emergencia, pise la lámina pequeña.

1.2.2 Ubicación del Carro de Emergencia HS-ET750

Para prolongar la vida útil del carro de emergencia, evite colocarlo en los siguientes lugares:

- Lugares expuestos a la luz solar directa.
- Cerca de aparatos de calefacción.
- Lugares expuestos al exceso de vapor de agua y aceite.
- Lugares con altas y bajas temperaturas.
- Uso en los siguientes entornos: temperatura de 5 °C a 40 °C, humedad relativa ≤ 80 %.
- Lugares con mucho polvo, humo, sal, azufre, sustancias corrosivas, etc.
- Lugares con poca ventilación.
- Lugares con vibraciones e impactos (incluso durante la manipulación).
- Donde el suelo no sea firme.
- Donde el suelo no esté nivelado.

2 Especificaciones

2.1 Medidas

Nombre	Modelo	Medidas
Carro de emergencias	HS-ET750	750X480X920mm

2.2 Características

Todos los accesorios están fabricados con ABS moldeado por inyección, lo que los hace firmes, elegantes y amplios.

Manijas curvas a ambos lados de la mesa, diseño de depresión central e incrustadas con vidrio suave transparente, para evitar rayones.

Asa de diseño arqueado.

El diseño de la submesa de ABS permite extender la mesa de trabajo durante el uso

Configuración de cajones: dos cajones pequeños, dos cajones centrales, un cajón grande, partición integrada y partición libre (estándar con inserción 3x3). Cada cajón se puede extraer independientemente del marco, lo que facilita la colocación y la limpieza.

El soporte de infusión se puede subir o bajar libremente, que se puede ajustar a una altura adecuada de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Otros accesorios: dos cestos de residuos, porta agujas desechables, porta sueros, estante para desfibrilador, tablero de RCP (550 x 4 x 20 x 25 mm), soporte para tanque de oxígeno, toma corriente y ganchos, cerradura centralizada, archivador, barandilla de acero inoxidable 304, ruedas silenciosas, etc.

Equipado con cuatro ruedas silenciosas (dos con freno y dos sin freno) de 100 mm de diámetro.

Dimensiones de la mesa: 750x480 mm

2.3 Lista de Partes

Al abrir nuestros productos, asegúrese de que los accesorios del paquete estén completos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.

Cant	Nombre	Medidas	Descripción
1	HS-ET750 Carro de Emergencias	750*480*920mm	2 llaves, 1 soporte para desfibrilador, 1 varilla de infusión, 1 tabla de reanimación cardiopulmonar, 1 cable de alimentación, 1 soporte para botella de oxígeno, 1 caja de datos, 2 cestos de residuos, 1 caja para herramientas para porta agujas, 2 cajones pequeños (incluye 3 insertos), 2 cajones centrales (incluye 3 insertos), 1 cajón grande (incluye 3 insertos)

3 Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento diario

1. Compruebe si los tornillos de fijación de todas las piezas están apretadas.
2. Compruebe si las ruedas funciona correctamente.
3. Cada componente debe mantenerse limpio y puede limpiarse con un paño suave.

Limpieza y desinfección

1. Además de la inspección y el mantenimiento diarios, este equipo también debe limpiarse y desinfectarse periódicamente. La limpieza puede realizarse con un paño suave y, en caso de contaminación, se requiere un tratamiento de desinfección. Se pueden utilizar limpiadores y desinfectantes con cloro según la situación, pero no es recomendable usar una gran cantidad de desinfectantes ineficaces en el entorno hospitalario para evitar la generación de cepas resistentes a los desinfectantes.
 2. Los cajones para medicamentos y líquidos deben limpiarse y desinfectarse periódicamente.
-

4 Importador

Importador:

CardioTecnica SRL
Av. Reservistas Argentinos 443
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Código Postal C1408All
Buenos Aires - Argentina.

Tel/Fax: (5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482

WhatsApp: +5491150353896

Web: cardiotecnica.com.ar

E-mail: info@cardiotecnica.com.ar; ventas@cardiotecnica.com.ar



DISPOSITIVOS
MÉDICOS

RI 13485-016



La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016

Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
Whatsapp: +54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar