

INSTRUCTIVO DE ARMADO CARRO DE USO GENERAL MODELO 201K

Las siguientes partes componen el carro 201K y deben estar en la caja del mismo:



Bandeja superior



bandeja inferior




2 cajones



2 barandas largas y 4 cortas



1 manija de transporte

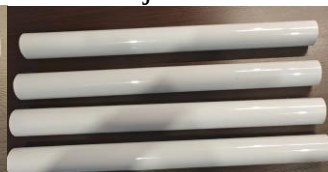

4 columnas



4 ruedas ,2 con freno



fijación baranda superior



fijación baranda inf

Armado:

A la bandeja superior se le coloca la manija ,las barandas y las tapas ciegas , teniendo en cuenta, de qué lado abren los cajones para que esto se produzca del lado del frente (el lado abierto colisas de los cajones y las trabas de los mismos deben quedar al frente).



Fabricación, Service y Ventas

Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría

Luego se enroscan las 4 columnas en los soportes de la baranda superior y se coloca la baranda del estante inferior.



A continuación se enroscan las ruedas en las columnas y se colocan los cajones, teniendo especial cuidado en no romper las trabas que hacen que los cajones no se salgan de sus guías.



Quedando de esta forma el carro armado



Fabricación, Service y Ventas

Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría