

INSTRUCTIVO DE ARMADO CARRO DE USO GENERAL MODELO HS-SPT720B

Las siguientes partes componen el carro HS-SPT720B y deben estar en la caja del mismo:



Bandeja superior

Bandeja Inferior

Columnas



Bujes Plásticos

Barandas

4 ruedas 2 con freno



Tapa Bujes Plásticos

Esquineros

Tornillos

Armado:

A las columnas se le colocan los dos esquineros para fijar 4 barandas y dos esquineros para fijar dos barandas, luego se coloca la bandeja superior, teniendo especial atención que la apertura de las guías del cajón queden para el lado que no hay barandas, debiendo quedar como la imagen.

Fabricación, Service y Ventas

Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría




Luego dar vuelta el carro en un lugar firme pero que no ralle las columnas y bajar el estante hasta que queden a la vista las perforaciones de las columnas.



Colocar los bujes, haciendo que los pernos plásticos ingresen en la perforación del caño.



Una vez colocados los 4 bujes plásticos de la bandeja superior, se atornillan las tapas de los bujes plásticos.

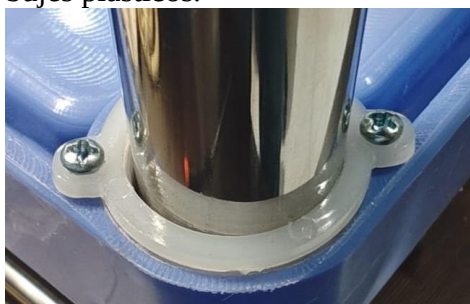


Fabricación, Service y Ventas

Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría

El próximo paso es armar la baranda inferior de forma similar a la baranda superior, colocar la bandeja inferior, los bujes y las tapas de los bujes, como en la bandeja superior.



A continuación se colocan las ruedas, con las arandelas provistas, las dos con freno al frente y las dos sin freno, en la parte posterior

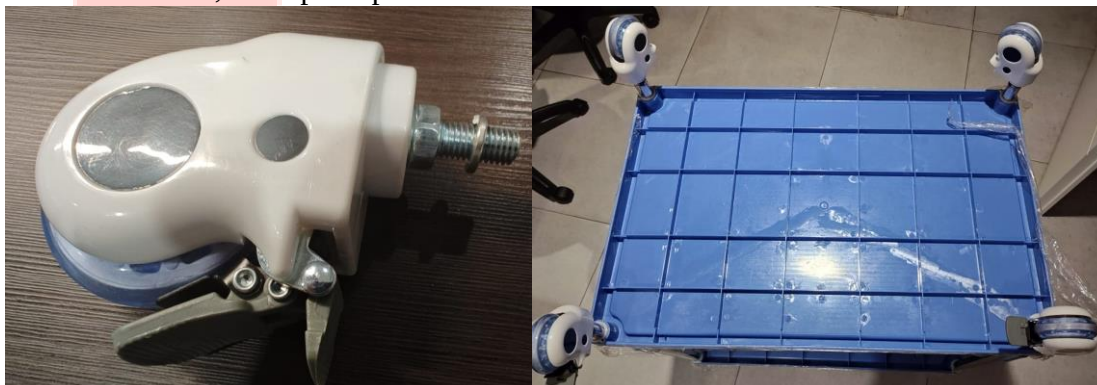

Por último se coloca el carro sobre sus ruedas y se coloca el cajón en las guías telescópicas.



Fabricación, Service y Ventas

Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría

Quedando de esta forma el carro armado como la imagen a continuación:



Fabricación, Service y Ventas

*Electrocardiógrafos, Monitores, Desfibriladores, Cardioversores
Oxímetros de Pulso, Respiradores, Mesas de Anestesia, Oxícapnógrafos
Cables Paciente, Sensores de Oximetría*